

Oxivir Excel Foam

Zamów tutaj!

PRAXISDIENST
Zaopatrzenie medyczne od 1953 r.

Preparat myjąco-dezynfekujący o szerokim spektrum działania,
zalecany również do nieinwazyjnych urządzeń medycznych

Skuteczny wg
normy 16615 w



Opis

Oxivir Excel Foam to gotowy do użycia preparat myjąco-dezynfekujący, w formie piany o szerokim spektrum działania oraz krótkich czasach kontaktu. Przeznaczony jest do mycia i dezynfekcji wszystkich twardych, nieporowatych powierzchni w szpitalach, jednostkach służby zdrowia, domach opieki oraz innych placówkach użyteczności publicznej. Zalecany jest również do nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Formuła produktu oparta jest na innowacyjnej technologii nadtlenu wodoru AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide: Przyspieszony Nadtlenek Wodoru).

Cechy

- ✓ szerokie działanie biobójcze zapewnia najwyższy poziom ochrony pacjentów; preparat posiada pełną skuteczność wirusobójczą wobec Poliovirus, Adenovirus oraz Murine norovirus, jest więc skuteczny wobec wszystkich wirusów otoczkowych, takich jak: HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia virus oraz Coronavirus;
- ✓ krótki czas kontaktu pozwala utrzymać powierzchnie w pełni zwilżoną co wpływa na szybszą i bardziej efektywną penetrację zanieczyszczeń organicznych występujących na powierzchniach;
- ✓ nadaje się do stosowania w obszarach wysokiego ryzyka w tym salach operacyjnych, oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz oddziałach noworodków;
- ✓ nie zawiera substancji zapachowych i barwiących;
- ✓ nie wymaga spłukiwania;
- ✓ substancja aktywna (nadtlenek wodoru) rozkłada się na tlen i wodę i nie odkłada się na powierzchniach dzięki czemu nie dochodzi do narastania oporności bakterii;
- ✓ aplikowany w formie piany eliminuje wytwarzanie mgły aerozolowej;
- ✓ bezpieczny dla użytkownika-nie podrażnia dróg oddechowych;
- ✓ znakomite właściwości myjące, włącznie z odkamienianiem i zapobieganiem osadzaniu się kamienia dzięki czemu eliminuje się etap wstępnego czyszczenia;
- ✓ może być stosowany w pionie żywienia;

Oxivir Excel Foam

Skuteczny wg
normy 16615 w



Skuteczność mikrobójcza Oxivir Excel Foam

działanie	EN test	czas kontaktu
		warunki brudne
bakteriobójcze	EN13727	30 sek
	EN13697	5 min
	EN16615	1 min
grzybobójcze	EN13624	5 min
	EN13697	5 min
	EN16615	1 min
wirusobójcze	EN14476	30 sek

Sposób użycia Oxivir Excel Foam

Pianowe mycie i dezynfekcja

1. Usunąć grubsze zabrudzenia;
2. Natrysnąć preparat na ściereczkę i przetrzeć dezynfekowaną powierzchnię albo nanieść bezpośrednio na powierzchnię za pomocą spryskiwacza; upewnić się, że cała powierzchnia jest dobrze zwilżona;
3. Upewnić się, aby powierzchnia pozostała wilgotna przez zalecany czas kontaktu;
4. Po upływie czasu zalecanego kontaktu wytrzeć do sucha albo pozostawić do wyschnięcia, nie wymaga spłukiwania.

Warunki przechowywania

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie dopuszczać do zamarzania. Nie przechowywać razem z produktami zawierającymi związki wybielające na bazie chloru lub siarczyny. Wchodzi w reakcję z alkaliom.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Oxivir Excel Foam, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Dane techniczne

wygląd: przezroczysta ciecz
gęstość względna [20° C]: 1.0001 g/cm³
pH-rozrztworu: < 2.0 (nierozcieńczony)
zapach: neutralny

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Certyfikaty i atesty

Wyrób Medyczny kl. IIa.

Informacja środowiskowa

Środki powierzchniowo czynne stosowane w tym produkcie są biodegradowalne zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie detergentów UE, WE 648/2004.

Opakowanie handlowe

Oxivir Excel Foam 6 x 750 ml

W linii produktów Oxivir Excel dostępne są również:

Oxivir Excel 2 x 5L
Oxivir Excel Wlpe 12 x 100 pc

Kompatybilność materiałowa

Używany zgodnie z zaleceniami producenta Oxivir Excel Foam jest odpowiedni do użycia na większości powierzchni.

Postępowanie z odpadami

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowanie powinno zostać zutylicowane przez certyfikowanego odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązującym prawem.

Skład preparatu

nadtlenek wodoru (3,6 g/kg), anionowe środki powierzchniowo czynne (<5%)



CE 0088